

موارد استفاده از ماسک N95

بطور کلی در مواجهه با هر بیماری که نیاز به رعایت احتیاط هوایی (Air borne Precautions) دارد و یا زمان انجام پروسیجرهای تولید کننده آئروسل (مانند ساکشن و انتوباسیون) هر بیماری که نیاز به رعایت احتیاطات قطرات (Droplet Precautions) دارد استفاده از ماسک N95 الزامی است.

سل ریه یا حنجه	بیماریهای نیازمند احتیاط های مربوط به انتقال از طریق هوا (Air borne Precautions)
سرخ	
آبله مرغان	
زونای منتشر	
بیماران دچار عفونت HIV همراه با سرفه و ارتشاج ریوی	
بیماران دارای زخم باز پوستی ناشی از سل	
سندروم حاد شدید تنفسی (SARS)	
آنفلوآنزای H1N1	
تب خونریزی دهنده ویروسی	
آنفلوآنزای نوع B	
منزیت	بیماریهای نیازمند احتیاط های مربوط به انتقال از طریق قطرات (Droplet Precautions)
پنومونی مقاوم به چند دارو	
آنفلوآنزای ساده	
اوریون	
مايكوپلاسم پنومونیه	
سیاه سرفه	
سرخجه	
B19	
دیفتری حلقوی	
مخملک	

➤ زمان هایی که می بایست ماسک N95 را دور بیندازید :

- اگر ماسک N95 بطور واضح آسیب دیده یا تنفس کردن از درون آن سخت است، آن را دور بیندازید .
- اگر ماسک دچار آسیب فیزیکی (مثل شل شدن نوارهای کشی، عدم فیکس مناسب ماسک روی صورت، شکسته شدت قطعه فلزی روی بینی و...) شده، آن را دور بیندازید.
- اگر ماسک آلوده به خون و سایر ترشحات بدن بیمار است آن را دور بیندازید.
- بعد از انجام پروسیجرهای تولید کننده آئروسل (انتوباسیون، ساکشن اندوتراکیال، برونکوسکوپی و...) ماسک را دور بیندازید.

➤ نکات مهم دراستفاده مجدد از ماسک N95 :

- پیشنهاد می شود برای رعایت اینمی کارکنان و بیماران، هر ماسک بیشتر از ۵ مرتبه استفاده نشود.
- در بین دفعات استفاده، ماسک را داخل یک زیپ کیپ یا کیسه کاغذی تمیز نگهداری کنید.
- برای اجتناب از انتقال عفونت، ماسک ها را طوری نگهداری کنید که همدیگر را لمس نکنند.
- اسم کاربر را بطور واضح روی ماسک یا جعبه آن بنویسید.
- ظرف محتوی ماسک باید یکبار مصرف بوده و یا قابل شستشو باشد و بطور منظم شسته شود .
- از لمس سطح داخلی ماسک اجتناب شود. در صورت لمس اتفاقی سطح داخلی ماسک، بهداشت دست را رعایت کنید .
- قبل از پوشیدن یا تنظیم ماسک که قبلا پوشیده شده است، دستکش تمیز (غیراستریل) پوشیده و بعد از پوشیدن یا تنظیم، دستکش را دور بیندازید .
- از استفاده از ماسک بطور مشترک توسط کارکنان اکیدا اجتناب شود.
- هنگام درآوردن ماسک ، هرگز به قسمت های جلویی ماسک به علت آلوده بودن دست نزنید .

بندهای نگهدارنده باید در ناحیه ما بین سر و گردن بسته شوند. قسمتی که روی بینی قرار می گیرد را به خوبی ثابت نمایید. مطمئن شوید که قسمت های دیگر به خوبی بر روی صورت و زیر چانه قرار گرفته اند.

