

هشدار ایمنی

دستورالعمل ایمنی گازهای طبی

واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان مهر



۱. پیش از تحویل سیلندر، از سالم بودن تمامی قسمت‌های آن مطمئن شوید.
۲. استعمال دخانیات در محل‌های ذخیره‌ی گازهای طبی و کلیه نقاط بیمارستان **ممنوع** است.
۳. شیر کپسول اکسیژن را به آهستگی باز کنید.
۴. در هنگام باز کردن شیر کپسول اکسیژن دقت شود که فشارسنج (گیج فشار) پشت به فرد باشد .
۵. تجهیزات اکسیژن را همیشه تمیز نگه دارید .
۶. هرگز با دست **چرب و روغنی** شیر سوپاپ اکسیژن را **باز نکنید** .
۷. به طور عمومی از روغن کاری شیر کپسول و اتصالات مربوط خودداری کنید.
۸. در صورت یخ زدن شیر کپسول از آب نیم گرم برای برداشتن یخ و انتقال به محیط گرم اقدام کنید.
۹. کپسول‌ها باید به صورت ایستاده و با ابزار مناسب از قبیل زنجیر و هولدر در مقابل سقوط مهار شوند.
۱۰. در هنگام نگهداری، کپسول‌ها را از یکدیگر جدا و کپسول حاوی هر نوع گاز را به صورت مجزا نگهداری کنید.
۱۱. درپوش (محافظ) شیر می‌بایست بر روی آن قرار داشته باشد.
۱۲. از قرار دادن کپسول بر روی سطح مرطوب به دلیل خوردگی خودداری نمایید.
۱۳. وسایل اطفاء حریق می‌بایست در محل نگهداری کپسول‌ها وجود داشته باشد.
۱۴. از قرار دادن سیلندرهایی که در مجاورت سیلندرهایی خالی خودداری کنید.
۱۵. از قرار دادن کپسول‌ها در مجاورت گرما و زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید.
۱۶. از آویزان کردن لباس و وسایل بر روی کپسول‌ها خودداری نمایید.
۱۷. از غلتانیدن سیلندر و کشیدن آن روی زمین خودداری و از ترالی های دستی استفاده نمایید.
۱۸. بر روی سیلندر گاز طبی نام گاز پر شده به زبان فارسی ،فرمول شیمیایی و نام بیمارستان می بایست درج گردد.
۱۹. رنگ سیلندر اکسیژن **سفید** ، پراکسید ازت یا نایتروس اکساید **آبی** ، نیتروژن **سیاه** و دی اکسیدکربن **خاکستری** است.
۲۰. در صورت مشاهده‌ی عیب فنی، یا اعمال و شرایط نایمن، به واحد **تاسیسات** و یا **بهداشت حرفه‌ای** گزارش دهید.



Danger
Hazardous
substances

**Wear personal
protective
equipment**



**Report all
accidents
immediately**